

Ellen tampony probiotyczne Normal, 22 sztuki



Cena: 69,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	22 sztuki
Postać	tampony
Producent	MEDIMES SP. Z O.O.
Rejestracja	

Opis produktu

Opis produktu

Tampony Ellen w rozmiarze Normal to produkt do ochrony menstruacyjnej z probiotycznymi bakteriami kwasu mlekowego. Tampony zawierają Lacto Naturel (LN)- 3 szczepy bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus gasseri LN40, Lactobacillus fermentum LN99 oraz Lactobacillus rhamnosus LN113), które wzajemnie wzmacniają swoje działanie, utrzymują niskie pH i chronią środowisko pochwy. Nieodpowiedni poziom kwasu mlekowego w pochwie może zachwiać równowagę środowiska mikrobiologicznego, co może prowadzić do infekcji.

Tampony w rozmiarze Normal pochłaniają 9-12 g g płynu menstruacyjnego.

Zastosowanie

Tampony Ellen działają dwukierunkowo:

- Pochłaniają płyn menstruacyjny,
- Uwalniają bakterie probiotyczne, które są aktywowane pod wpływem wilgoci menstruatu (nawadnia wysuszone w procesie liofilizacji bakterie).

Tampony Ellen mogą być stosowane zarówno w okresie menstruacyjnym, jak i tampon prebiotyczny.

Sposób użycia

- Dokładnie umyj ręce.
- Pociągnij bawełniany sznurek, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Staraj się jak najmniej dotykać tamponu przed włożeniem.
- Połóż palec na spodzie tamponu, oddziel wargi sromowe i delikatnie przesun tampon do góry.
- Tampon jest prawidłowo założony, gdy go nie czujesz.
- Gdy chcesz usunąć tampon pociągnij za sznurek.

Dodatkowe informacje

- Aby uzyskać maksymalną korzyść, używaj co najmniej 3 tamponów/dzień.
- Pozostaw tampon na co najmniej 2 godziny, ale nigdy dłużej niż 8 godzin.